

Sistema de cuidado para accesorios dentales removibles

Recomendado para todos los accesorios dentales removibles, incluyendo partes dentales total o parcialmente metálicas, retenedores de ortodoncia, broches metálicos y revestimientos suaves.

El kit incluye:

Gel antibacterial (botella de 4 oz.), líquido limpiador (botella de 8 oz.) y recipiente de remojo.



Gel antibacterial

Al aplicar el gel antibacterial con xilitol a tus accesorios dentales removibles ayudarás a mantener un aliento fresco y a eliminar bacterias que pueden causar caries. Para mejores resultados, aplíquelos después de cada comida.

Líquido limpiador

El limpiador antibacterial ayuda a remover restos de calcio, prevenir el regreso de manchas y la acumulación de placa. Seguro y efectivo, este líquido no es corrosivo para piezas dentales total o parcialmente metálicas, retenedores de ortodoncia, broches metálicos y revestimientos suaves.



Recipiente de remojo

Un conveniente recipiente de dos partes con una cesta para escurrir que permite mezclar líquidos, escurrir tu accesorio dental removible y guardar mezclas para usar más adelante.

Revisa más detalles en denmat.com



CALL 888-60-DENTAL
westerndental.com

Western Dental® & Orthodontics

Direcciones para el uso del sistema de cuidado

Gel antibacterial instrucciones de aplicación



Para dentaduras: Frote suavemente para esparcir una delgada capa de gel directamente en el tejido suave del accesorio dental antes de ponerse la dentadura.

Para accesorios dentales removibles como retenedores o protectores bucales: Aplique una pequeña gota de gel en los compartimientos dentales individuales de su accesorio dental removible o en la parte inferior del retenedor antes de ponerlo en la boca. Para mejores resultado aplíquelo después de cada comida.

Apply a small bead of gel onto your appliance.

Cleaning Solution Instructions



Agite suavemente por 15 segundos antes de usar.



Enjuague y cepille el accesorio para remover cualquier partícula suelta.



Usando la taza medidora adjunta, combine 1 oz. de Líquido Limpiador con 4 oz. de agua y mézclelos en el Recipiente de Remojo.



Remoje al menos durante 4 minutos.



Enjuague minuciosamente el accesorio con agua limpia antes de ponerlo en la boca.

Note: Nota: Para el premer uso, remójelo durante la noche. Reutilice la mezcla hasta que la capacidad de limpieza disminuya. El líquido mezclado puede ser efectivo y reutilizable por hasta 12 limpiezas. Esta botella de 8 oz. puede ser usada por hasta 96 limpiezas. La recarga de 16 oz. se vende por separado.

Revisa más dentales en denmat.com

Instrucciones entregadas para la comodidad del paciente. Para más detalles favor consultar las instrucciones del fabricante incluidas en cada envase.

